

# ПАСПОРТ

Тумбочка медицинская  
BLZ 016 (ПТ-003Д)  
BLZ 030 (ПТ-001)



Модель	Габаритные размеры с опорными роликами, мм	Вес изделия с роликами
BLZ 016 (ПТ-003Д)	Ширина: 470 Глубина: 470 Высота: 800	12,4 кг
BLZ 030 (ПТ-001)	Ширина: 640-1380 Глубина: 460 Высота: 860-1250	23,7 кг

Производство:

«Цзянсу Юнфа Медикал Экуипмент Ко., Лтд»

Номер партии: 072020080302-24/20

### 1. Назначение

Тумбочка медицинская прикроватная предназначена для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати в медицинских учреждениях.

### 2. Общие характеристики

Изделие BLZ 016 (ПТ-003Д) оборудовано:

- Столешница тумбочки
- Верхняя выдвижная полка
- Верхний выдвижной ящик
- Нижнее отделение с полкой и дверцей
- Откидные держатели
- Откидные крючки

Изделие BLZ 030 (ПТ-001) оборудовано:

- Столешница основная
- Столешница поворотная наклоняемая
- Переставная полка
- Верхний выдвижной ящик
- Нижнее отделение с дверцей

### 3. Описание

#### **BLZ 016 (ПТ-003Д):**

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из высокопрочного АБС-пластика.

**Столешница тумбочки** имеет бортик по периметру для избегания несанкционированного падения предметов со столешницы.

**Верхняя выдвижная полка** имеет 2 функциональных углубления

**Верхний выдвижной ящик** имеет ручку скрытого вида (углубление эргономичной формы в нижней части передней стенки), для уменьшения габарита тумбочки по глубине

**Нижнее отделение** оснащено переставной полкой и дверцей

**Откидные держатели** изготовлены из пластика, размещены в верхней части боковых стенок тумбочки, для переноса изделия также выполняют функцию держателей полотенец в выдвинутом положении, в убранном состоянии не выступают за плоскость стенки

**Откидные крючки** изготовлены из пластика, размещены в верхней части боковых стенок тумбочки, выполняющие функцию держателя для полотенец, либо других необходимых пациенту приспособлений, в убранном состоянии не выступают за плоскость стенки.

#### **Опорные ролики:**

Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий ролики из пластика, Ø40

#### **Тормозная система:**

Индивидуальный тормоз на 2х роликах

### **BLZ 030 (ПТ-001):**

Каркас и стенки тумбочки -сварная конструкция, выполненная из гнутого стального листа, покрытого эпоксидной эмалью, с ребрами жесткости специального профиля. Столешницы, Передняя стенка выдвигаемого ящика и дверца нижнего отделения выполнены из HPL пластика.

**Поворотная наклоняемая столешница** тумбочки с декоративным пластиковым покрытием по периметру торца.

**Верхний выдвижной ящик** на стальных двухсекционных телескопических направляющих.

Мебельные петли с доводчиком для фиксации **дверцы нижнего отделения** в закрытом положении.

**Ручки** ящика и дверцы изготовлены из хромированной стальной круглой трубы.

#### **Опорные ролики:**

Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий из пластика, Ø50

#### **Тормозная система:**

Индивидуальный тормоз на каждом из роликов

#### Общие требования:

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

### **4. Упаковка, транспортировка, хранение**

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.


При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150.

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре от -5°C до +40°C при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °C и при более низких температурах – без конденсации влаги.

### **5. Сборка BLZ 016 (ПТ-003Д):**

<b>Шаг 1</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Положите заднюю стенку изделия на заранее подготовленный картон, ветошь и т.д. на полу.</li><li>• Присоедините к ней боковые стенки.</li></ul>	<b>Шаг 2</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вставьте дно в пазы боковых стенок изделия.</li></ul>
<b>Шаг 3</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вставьте переднюю дверцу в слот.</li></ul>	<b>Шаг 4</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Приставьте столешницу к верхней части изделия, затем аккуратно закрепите ее (например, при помощи киянки).</li><li>• Вставьте полку в отделение.</li></ul>
<b>Шаг 5, 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вставьте выдвижной</li></ul>	<b>Шаг 7</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вкрутите колеса в</li></ul>

	<p>стол и ящик.</p>		<p>отверстия на дне изделия.</p>
---	---------------------	--	----------------------------------

## 6. Уход

По возможности сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости), но не реже 1 раза в 3 месяца, затягивать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 7. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящего паспорта; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причинённых вследствие ненадлежащего обращения. Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации. Гарантия предоставляется при соблюдении условий эксплуатации, указанных в данном паспорте. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, гарантия на замененные детали и узлы действует до окончания основного срока гарантии на изделие.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.